

UNDER PATCH CAPTEUR PROTECT

Popis

Náplasti CAPTEUR PROTECT jsou zdravotnické prostředky třídy I, nesterilní, pro jednorázové použití, kompatibilní s glukometry nebo inzulinovými pumpami.

Indikace

Náplasti CAPTEUR PROTECT jsou určeny pro použití s kontinuálními senzory glukózy nebo inzulinovými pumpami pro diabetiky.

UNDER SOLUTION se používá jako ochranná vrstva pokožky při použití adhezivních zdravotnických prostředků*.

* Zdravotnický prostředek = glukózový senzor, inzulinová pumpa a katetr

Složení

- Nosná vrstva: Elastická netkaná nylonová a polyuretanová tkanina
- Lepidlo: Akrylové polymery bez latexu[£], IBOA[£] (Isobornylakrylát), kolofonie[£]
- Krycí vrstva: Antiadhézní papír

£ Hlavní kontaktní alergie

Upozornění a bezpečnostní opatření

- Náplast Capteur Protect je určena pouze k jednorázovému použití a vyžaduje pečlivou aplikaci.
- Aplikujte náplast přesně v souladu s návodem k použití.
- Nedodržení návodu k použití bude mít za následek špatnou přilnavost.
- V případě nežádoucího účinku během používání okamžitě odstraňte náplast Capteur Protect, přestaňte ji používat a poradte se s lékařem nebo lékárníkem.

Aplikace

- Optimální přilnavost je na oholené nebo depilované pokožce.
- Aplikujte na čistou, suchou pokožku bez krémů, pleťových vod a olejů, abyste zabránili předčasnému olupování.
- Denní hydratace snižuje riziko podráždění pokožky.
- Odstraňte krycí vrstvu z adhezivní části zdravotnického prostředku*.
- Nalepte zdravotnický prostředek* na látkovou stranu náplasti Capteur Protect, přičemž dodržujte polohu otvoru a pokyny výrobce.
- Odstraňte krycí vrstvu z náplasti Capteur Protect a přilepte ji na pokožku.
- Zdravotnický prostředek* se přilepí na pokožku díky lepidlu na náplasti Capteur Protect.
- Doporučuje se počkat 45 až 60 minut před sprchováním, plaváním nebo intenzivním cvičením, aby náplast lépe přilnula ke kůži.
- Náplast Capteur Protect zůstane na svém místě po celou dobu používání zdravotnického prostředku*

Odstranění

- Na konci používání zdravotnického prostředku* začněte s odlupováním náplasti od jejího okraje, aby bylo odstranění snazší.

*Zdravotnický prostředek = glukózový senzor, inzulinová pumpa a katetr

Kontraindikace

Nepoužívejte náplasti Capteur Protect na citlivou, poškrábanou nebo spálenou pokožku.

Nežádoucí účinky

V případě jakékoliv nežádoucí reakce během použití se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Vážné incidenty související s tímto zařízením musí být nahlášeny výrobci a příslušnému orgánu země, kde k incidentu došlo.

Podmínky skladování

Skladujte při teplotách mezi 5 a 30 °C. Datum expirace odpovídá datu neporušeného a správně skladovaného produktu. Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.

Výrobce

CAPTEUR PROTECT

295 allée du Verdon - 26300 BOURG DE PEAGE – Francie

Datum poslední verze tohoto návodu k použití: 07/2024

(IFU_TCP01_Instruction for use UNDER patchs_EN_Rev0)

Význam symbolů

	Výrobce		Nepoužívejte v případě poškozeného obalu		Nepoužívejte opakovaně
	Referenční číslo		Skladujte na místě mimo přímé sluneční světlo		Nesterilní
	Číslo šarže		Teplotní limit		Bez kolofonie Bez isobornylakrylátu (IBOA)
	Datum výroby		Uchovávejte v suchu		Bez latexu
	Spotřebujte před datem expirace		Recyklovatelný obal		Značka CE
	Upozornění		Jedinečná identifikace zdravotnického prostředku		Zdravotnický prostředek
	Prostudujte si návod k použití				