

COVER PATCH CAPTEUR PROTECT

Popis

Náplasti CAPTEUR PROTECT jsou zdravotnické prostředky třídy I, nesterilní, pro jednorázové použití, kompatibilní s glukometry nebo inzulinovými pumpami.

Indikace

Náplasti CAPTEUR PROTECT jsou určeny pro použití s kontinuálními senzory glukózy nebo inzulinovými pumpami pro diabetiky.

COVER SOLUTION slouží k udržení, zakrytí nebo podpoře akceptace adhezivních zdravotnických prostředků*.

**Zdravotnické prostředky = glukózový senzor, inzulinová pumpa a katetr*

Složení

- Nosná vrstva: Elastická netkaná nylonová a polyuretanová tkanina
- Lepidlo: Akrylové polymery bez latexu[£], IBOA[£] (Isobornylakrylát), kolofonie[£]
- Krycí vrstva: Antiadhézní papír

[£]Hlavní kontaktní alergen

Upozornění a bezpečnostní opatření

- Náplast Capteur Protect je určena pouze k jednorázovému použití a vyžaduje pečlivou aplikaci.
- Aplikujte náplast přesně v souladu s návodem k použití.
- Nedodržení návodu k použití bude mít za následek špatnou přilnavost.
- V případě nežádoucích reakcí během používání náplast ihned odstraňte, přestaňte ji používat a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Aplikace

- Optimální přilnavost je na oholené nebo depilované pokožce.
- Aplikujte na čistou, suchou pokožku bez krémů, pleťových vod a olejů, abyste zabránili předčasnému olupování.
- Denní hydratace snižuje riziko podráždění pokožky.
- Oddělte střední část náplasti odstraněním předřezaného disku (pokud je to možné v závislosti na nasazeném zdravotnickém prostředku*).
- Pomocí záložek papír z náplasti.
- Aplikujte náplast na zdravotnický prostředek* nebo kolem něj (v závislosti na modelu), aniž byste ji natahovali, přičemž dodržujte polohu otvoru a pokyny výrobce.
- Doporučuje se počkat 45 až 60 minut před sprchováním, plaváním nebo intenzivním cvičením, aby náplast lépe přilnula ke kůži.
- Náplast Capteur Protect zůstane na svém místě po celou dobu používání zdravotnického prostředku*.

Odstranění

Na konci používání zdravotnického prostředku* začněte s odlupováním náplasti od jejího okraje, aby bylo odstranění snazší.

**Zdravotnický prostředek = glukózový senzor, inzulinová pumpa a katetr*

Kontraindikace

Nepoužívejte náplasti Capteur Protect na citlivou, poškrábanou nebo spálenou pokožku.

Nežádoucí účinky

V případě jakékoliv nežádoucí reakce během použití se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Vážné incidenty související s tímto zařízením musí být nahlášeny výrobci a příslušnému orgánu země, kde k incidentu došlo.

Podmínky skladování

Skladujte při teplotách mezi 5 a 30 °C. Datum expirace odpovídá datu neporušeného a správně skladovaného produktu. Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.

Výrobce

CAPTEUR PROTECT

295 allée du Verdon - 26300 BOURG DE PEAGE – Francie

Datum poslední verze tohoto návodu k použití: 07/2024

(IFU_TCP01_Instruction for use COVER patchs_EN_Rev0)

Význam symbolů

	Výrobce		Nepoužívejte v případě poškozeného obalu		Nepoužívejte opakované
	Referenční číslo		Skladujte na místě mimo přímé sluneční světlo		Nesterilní
	Číslo šarže		Teplotní limit		Bez kolofonie Bez isobornylakrylátu (IBOA)
	Datum výroby		Uchovávejte v suchu		Bez latexu
	Spotřebujte před datem expirace		Recyklovatelný obal		Značka CE
	Upozornění		Jedinečná identifikace zdravotnického prostředku		Zdravotnický prostředek
	Prostudujte si návod k použití				