





1. Odpojte senzor

Menu – CGM – Odpojte senzor ➡ Odstranění z těla

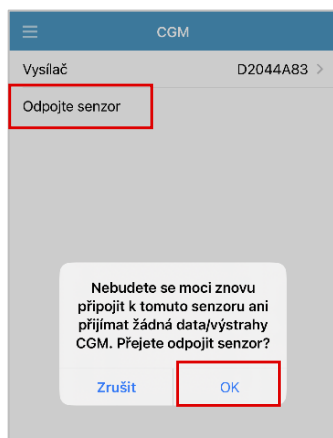

Jemným odlepením náplasti od pokožky jedním plynulým pohybem sejměte senzor a vysílač.

Přehněte a zlomte držák senzoru a opatrně vytáhněte vysílač.

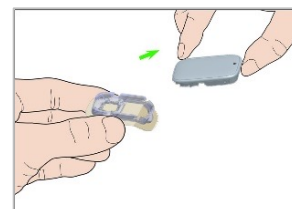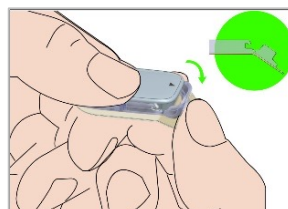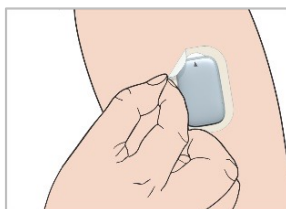


2. Nabijte vysílač

Zkontrolujte kontakty popř. je očistěte lihovým ubrouskem.


Na dobu **cca 15 minut** vložte vysílač do nabíječky




3. Aplikujte nový senzor

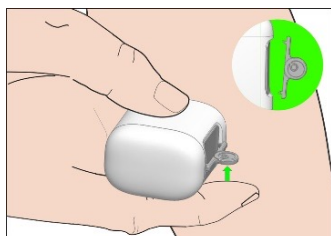


Palcem a prstem odklopte bezpečnostní pojistku tak, že na ní zatlačíte doleva nebo doprava.

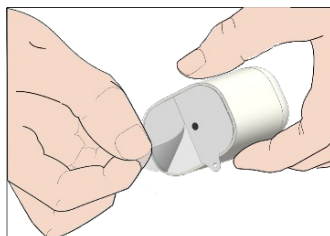


Dvoudílnou ochrannou vrstvu na okraji mírně ohněte, aby byl vidět spoj mezi oběma díly. Držte vkládací část senzoru a snažte se nedotýkat lepicího povrchu. Odstraňte ochranné vrstvy z nosného držáku senzoru jednu po druhé.

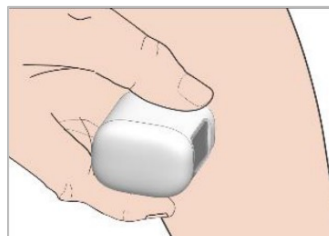

Umístěte senzor svisle na místo aplikace. Na 10 – 15 s hodně přitlačte aplikátor na kůži. Následně povolte. **Při svislé aplikaci musí být tlačítko vždy dolů.**

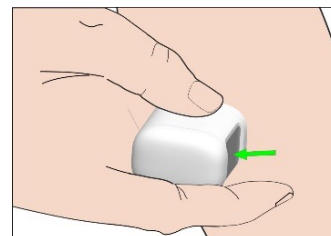

Jemně přitlačte aplikátor na místo aplikace a rychle stiskněte zasouvací tlačítko. Můžete cítit mírné štípnutí, protože senzor je umístěn těsně pod kůží.

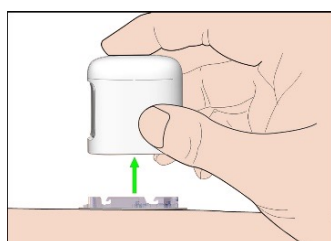

Aplikátor zdvihněte svisle nahoru. Na těle zůstane pouze držák senzoru.



Kontrola místa aplikace senzoru

Přesvědčte se, že náplast se senzorem správně přilnula ke kůži. Prstem přejedete po okrajích náplasti a zkontrolujete, zda nejsou mezi náplastí a kůží mezery.

Varování


- Pokud dojde ke krvácení v místě aplikace, nepřipojujte vysílač k senzoru. Na místo přitlačte sterilní gázu nebo čistý hadřík po dobu alespoň 3 minut. Po zastavení krvácení připojte vysílač k senzoru. Pokud krvácení pokračuje, nepřipojujte vysílač, dokud krvácení nezastavíte.
- Místo aplikace často kontrolujte, zda nedošlo k infekci nebo zánětu, zarudnutí, otoku nebo bolesti. Pokud se některý z těchto stavů objeví, vyjměte senzor a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

4. Připojení senzoru

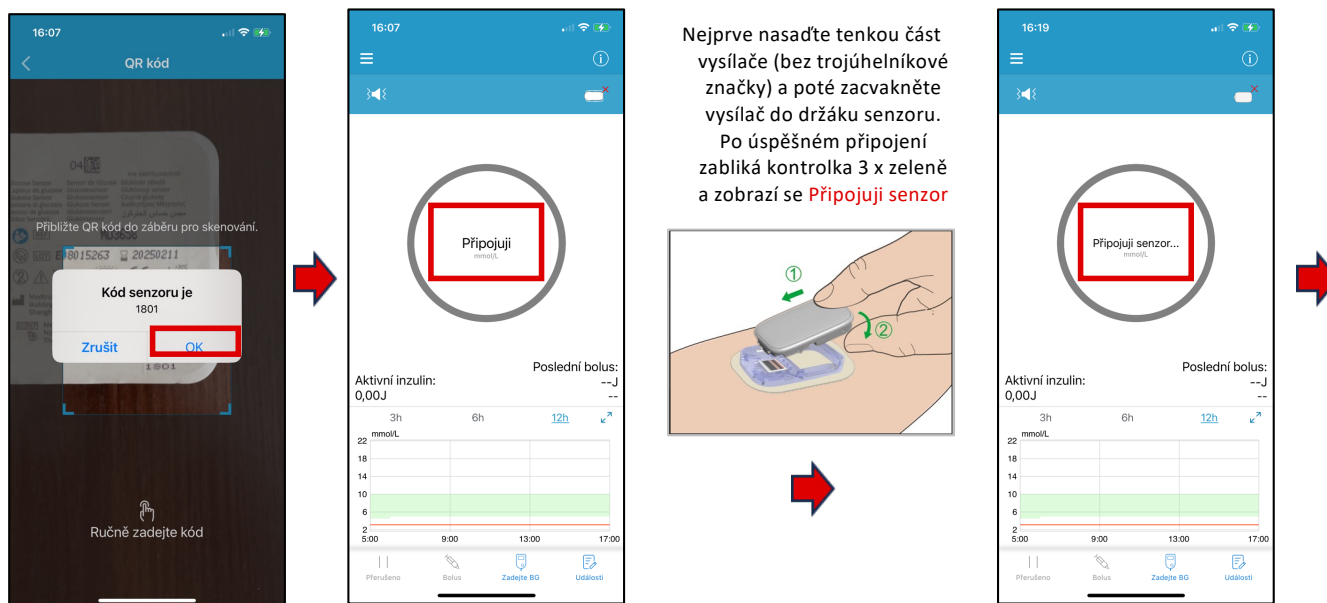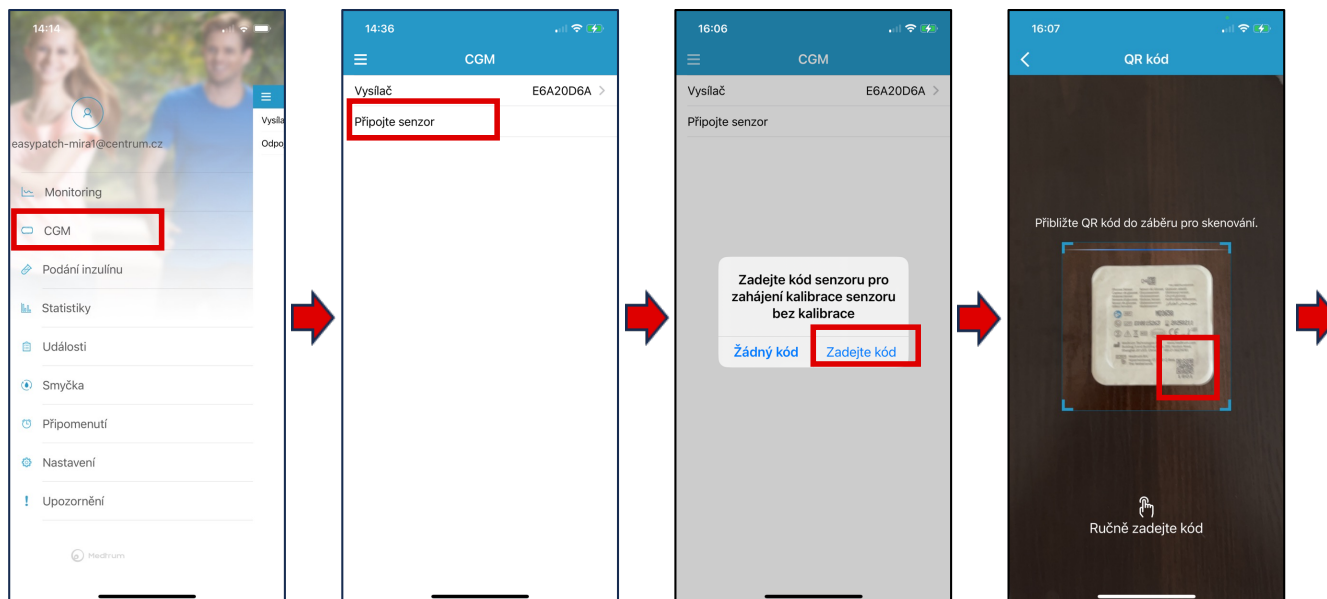

Nejprve nasadíte tenkou část vysílače (bez trojúhelníkové značky) a poté zacvaknete vysílač do držáku senzoru. Po úspěšném připojení zabliká kontrolka 3 x zeleně a zobrazí se **Připojuji senzor**.

Během jedné minuty blikne zelená kontrolka ještě 6krát, což znamená, že systém dokončil kontrolu. Následně začne proces **Zahřívání**.

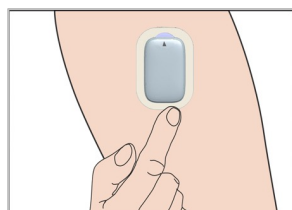

Úspěšné dokončení výměny senzoru

Kontinuální monitorace glykémie se spustí po dokončení zahřátí senzoru.