



1. Deaktivujte starou náplast v aplikaci

Menu – Podání inzulínu – Deaktivovat náplast

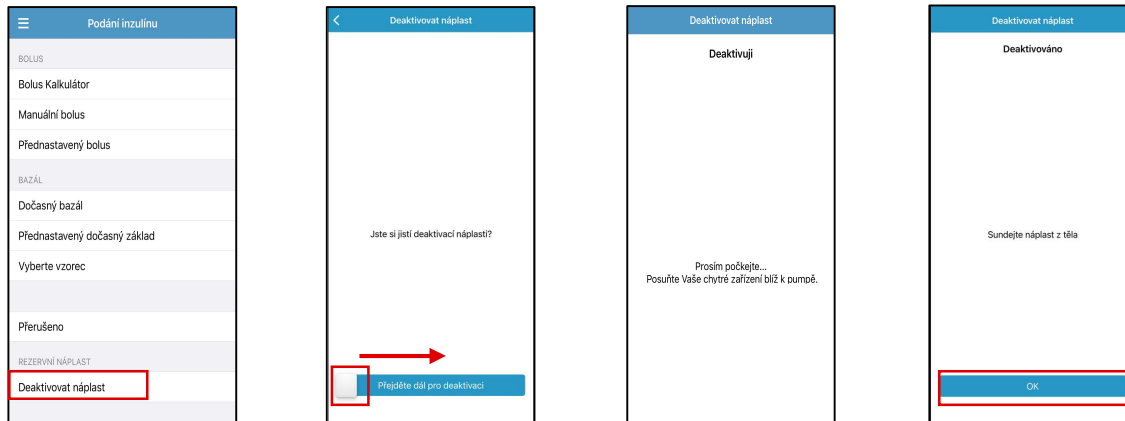


2. Odstraňte náplast z těla

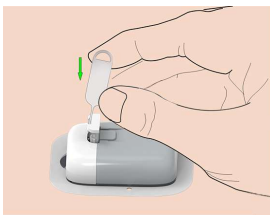


Vysuňte jehlu

Nástroj je obsažen v každém balení zásobníků

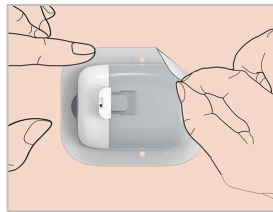

Odstraňte náplast z těla

V případě potřeby použijte odstraňovač lepidla nebo dětský olej.

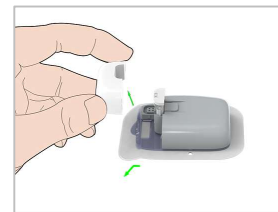

Rozpojte náplast

Zlomte destičku a vyjměte základnu pumpy. **Nenechávejte základnu spojenou se starým zásobníkem delší dobu!**

Zlikvidujte náplast se zásobníkem podle místních pravidel pro nakládání s odpady.

Základnu pumpy **NEVYHAZUJTE!!**

3. Příprava pro naplnění a aplikaci nového zásobníku

Kontrola kontaktů




Kontakty očistěte např. lihem




Naplňte stříkačku inzulínem


Natáhněte do stříkačky vzduch a natlačte ho do lahvičky.

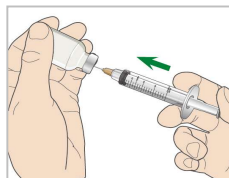

Naplňte stříkačku požadovaným množstvím inzulínu (minimálně 70J – maximálně 200J).

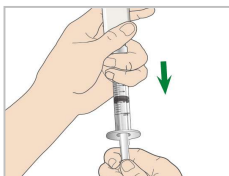


Menu – Podání inzulínu – Nová náplast

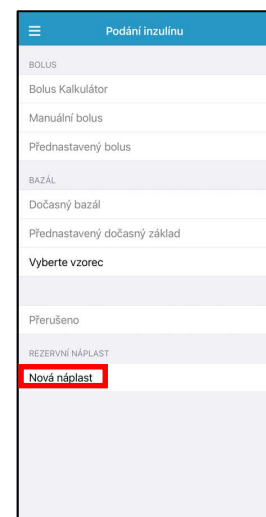

4. Naplnění nového zásobníku


Spojte základnu s novým zásobníkem

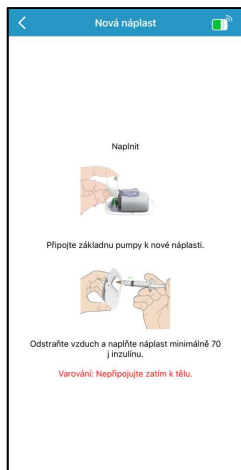


Po spojení pumpa 4x zapípá

Naplňte zásobník inzulinem


Jehlu zasuňte kolmo do plnicího portu. **Vytažením pístu stříkačky odstraňte vzduch z pumpy.**

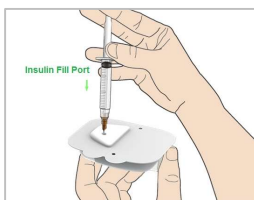

Vytáhněte jehlu a **odstraňte vzduch ze stříkačky s inzulinem.**

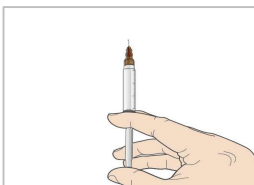


Zasuňte jehlu do plnicího portu a **pomalů** naplňte zásobník inzulinem.

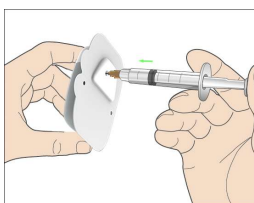


Plnění v aplikaci

Stiskněte tlačítko jehly

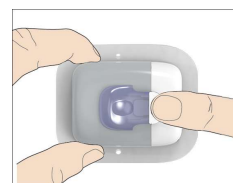

V aplikaci stiskněte tlačítko **Plnění (Prime)**


Nezačínáte plnění dříve než zmačknete tlačítko jehly
Proces plnění trvá 3 – 5 minut.

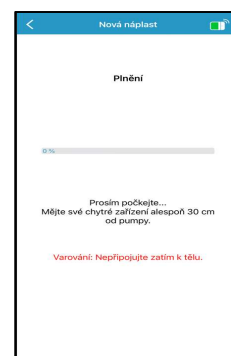


4. Aplikaci nového zásobníku

Příprava k aplikaci

Odstraňte bezpečnostní kryt.

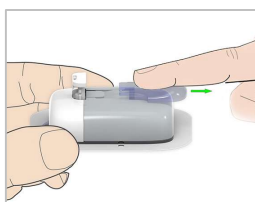

Odstraňte ochranné pásky.

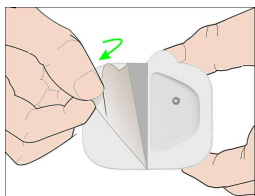


Aplikace náplasti


Přitlačte pumpu na **očištěnou, suchou a odmaštěnou** pokožku.



Přejeďte prstem po okrajích náplasti


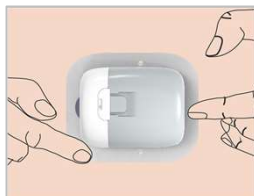


Namáčkněte tlačítko jehly.

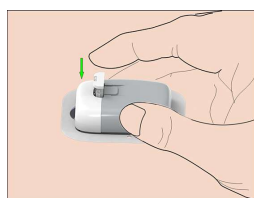

Spuštění pumpy

Po nalepení náplasti a aplikace jehly v aplikaci stiskněte tlačítko pokračovat

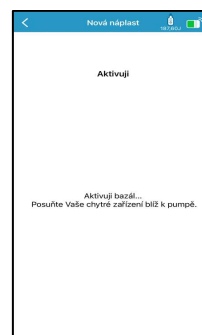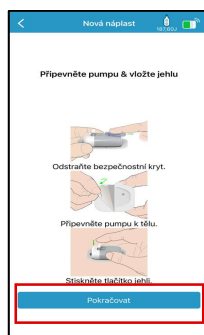

Zelený kruh znamená aktivní pumpu a její aplikace proběhla správně.

